


طریقه استفاده از دستگاه نبولایزر کمپرسوری PRIZMA مدل PRIZJET

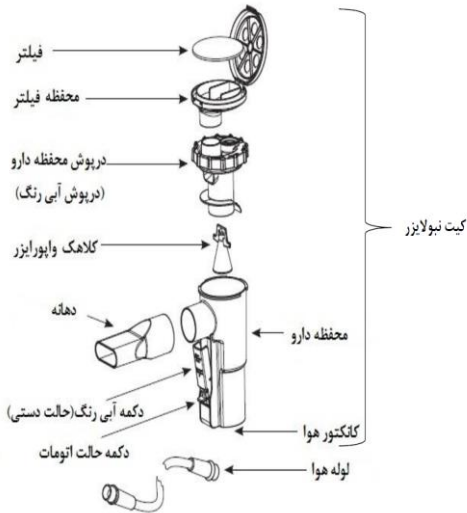

1. دستگاه و کیت مصرفی را از کیف خارج نمایید.

2. یک سر لوله هوا را به کانتور هوای جلوی کمپرسور و سر دیگر را به کانتور هوای موجود در انتهای کیت نبولایزر متصل کنید.

3. برای ریختن دارو در کیت نبولایزر، درپوش آبی رنگ را در جهت پادساعتگرد بچرخانید تا از محفظه دارو جدا شود.

4. پس از ریختن دارو، درپوش آبی رنگ را روی محفظه دارو قرار داده و در جهت ساعتگرد بچرخانید تا بسته شود.

5. دهانه را به محفظه دارو روی کیت نبولایزر متصل کنید.

6. دستگاه را به برق متصل کرده و کلید Power دستگاه را بزنید تا دستگاه روشن شود.

7. جهت استفاده دارو دهانه را نزدیک دهان خود قرار داده و به صورت عادی تنفس کنید.

8. برای شروع کار با نبولایزر دکمه آبی رنگ را فشار داده و در این حالت دستگاه تا زمانی که دکمه را نگه دارید کار می کند. جهت بخوردهی مداوم دستگاه بدون نگه داشتن دکمه، کلید حالت اتومات را به سمت پایین فشار دهید تا قفل شود.

9. جهت توقف نبولایزر کلید اتومات را به سمت بالا بکشید تا دکمه آبی رنگ رها شود.

نکته: ظرفیت محفظه دارو بین **3** تا **6** میلی لیتر می باشد.

نکته: کیت نبولایزر را بیش از **45** درجه خم نکنید زیرا ممکن است دارو وارد دهان شود.

نکته: محفظه تهویه روی کمپرسور را مسدود نکنید زیرا ممکن است باعث داغ شدن یا بد کار کردن کمپرسور شود.

نکته: نبولایزر، ماسک دهانه و بینی بند را مدام با آب داغ پس از هر بار استفاده تمیز کنید. همچنین کیت نبولایزر و بخش های کاربردی تنفس را پس از آخرین استفاده در روز ضد عفونی کنید.

نکته: در صورت وجود نرم کننده یا مایع غلیظ درون لوله هوا، آن را به رابط هوا روی کمپرسور وصل کرده (طرف انتهایی دیگر لوله هوا باید از کیت نبولایزر جدا باشد)، کمپرسور را روشن کرده تا با فشار هوا تولیدی تمامی رطوبت و ... از داخل لوله هوا خارج شود.

نکته: در حین استفاده چک کنید که دستگاه باید دارای صدا و لرزش باشد. همچنین، هوای فشرده شده در هنگام خروج از نبولایزر باید صدا تولید کند. این مسئله عادی بوده و بیانگر خرابی و بد کار کردن دستگاه نمی باشد.

توجه: در صورت بروز هر گونه ایراد احتمالی در دستگاه ها با پرسنل فنی شرکت تماس بگیرید، در صورت فک پلمپ دستگاه توسط دیگر افراد، ارائه سرویس بهینه میسر نبوده، دستگاه ها خارج از گارانتی خواهند شد و کلیه مسئولیت آن بر عهده پرسنل آن مرکز می باشد.

شرکت مهندسی پزشکی فنون طب رستاک

تلفن: 021 - 66561291

فکس: 021 - 66561293

تلفن سیار بخش فنی: 0919 - 969 52 58