

طریقه استفاده از دستگاه نبولایزر PRIZMA مدل PPROFI SONIC H



1- دکمه روشن را در پشت دستگاه فشار دهید.

2- محفظه مایع را به اندازه کافی پر کنید.

- مخزن مایع حداکثر 300 میلی لیتر

- مخزن دارو بین 5 تا 150 میلی لیتر

3- تنظیمات مربوط به نبولایزر را انجام دهید.

- با استفاده از دکمه  می توانید سرعت بخار خروجی را تنظیم نمایید.

- با استفاده از دکمه  می توانید غلظت بخار خروجی را تنظیم نمایید.

- با استفاده از دکمه  می توانید مدت زمان کارکرد نبولایزر را تنظیم نمایید.

- با استفاده از دکمه  می توانید زمان شروع کارکرد نبولایزر را تنظیم نمایید.

- با استفاده از دکمه  می توانید میزان دمای نبولایزر را تنظیم نمایید.

4- دکمه  را برای شروع به کار نبولایزر فشار دهید.

توضیح پنل جلویی دستگاه

تنظیم مدت زمان	 10:00	+	افزایش / کاهش
سرعت بخار خروجی			
غلظت بخار خروجی		-	
تنظیم دما			
تنظیم زمان شروع کارکرد	 11:25	▶	شروع / توقف
تنظیمات			

هشدار های توصیه ای

توجه: ظرف دارو از ترکیبات پلاستیکی ظریف(نازک)ساخته شده است.دقت کنید که فشار اضافی باعث ایجاد ترک یا شکستن ظرف نشود.

توجه: به منظور کار با صفحه ی نمایش لمسی تنها از نوک انگشتان خود (نه از وسایل نوک تیز) استفاده کنید تا از بروز آسیب به آن پیشگیری شود .

هشدار: هنگامی که دو شاخه دستگاه به پریز برق متصل است ، دقت کنید هیچگونه برخوردی با پیزوالکتریک دستگاه ایجاد نشود.

هشدار: به منظور پیشگیری از عفونت احتمالی دقت کنید که دستتان با بخش هایی از دستگاه که دارو و بخور از آن ها عبور میکند برخورد نکند .

توجه: از برخورد ترکیب ضد عفونی کننده با فضای داخل دستگاه جداً خودداری کنید.

توجه: تنها قطعاتی نظیر درپوش ظروف دارو، پوشش عایق کننده درپوش ،لوله تنفسی و قطعه دهانی را می توانید با استفاده از اتوکلاو در دمای 125 درجه سانتی گراد استریل کنید.

توجه: در صورت بروز هر گونه ایراد احتمالی در دستگاه ها با پرسنل فنی شرکت تماس بگیرید، در صورت فک پلمپ دستگاه توسط دیگر افراد، ارائه سرویس بهینه میسر نبوده، دستگاه ها خارج از گارانتی خواهند شد و کلیه مسئولیت آن بر عهده پرسنل آن مرکز می باشد.

شرکت مهندسی پزشکی فنون طب رستاک

تلفن: 021 - 66561291

فکس: 021 - 66561293

تلفن سیار بخش فنی: 0919 - 969 52 58